



Před použitím tohoto zařízení si přečtěte návod na obsluhu.



GOOD
medica

OSCILAČNÍ PILA NA SÁDRU



NÁVOD NA POUŽITÍ

Návod k použití

**SAFE BLADE
OSCILAČNÍ PILA NA SÁDRU**



Před použitím tohoto zařízení si přečtěte návod na obsluhu.

Návod v češtině 

Název výrobku:

OSCILAČNÍ PILA NA SÁDRU

Model:

SAFE BLADE

Výrobce:

Good Medica Sp. z o.o.
Opolska 149
52-013 Wrocław, Polsko

Obsah

strana

- 3 - Úvod
- 3 - O zařízení
- 4 - Parametry zařízení
- 5 - Kontrola dotažení a výměna pilového listu
- 5 - Bezpečnost při používání
- 8 - Prevence alergií a úrazů
- 8 - Převážení, uskladnění
- 9 - Čištění a dezinfekce
- 9 - Nejčastější poruchy
- 10 - Informace o elektromagnetické kompatibilitě a vlivu na životní prostředí
- 10 - Štítek na zařízení
- 10 - Vysvětlivky symbolů na štítku
- 11 - Servis


Úvod

Děkujeme za Vaši důvěru a za to, že jste si vybrali výrobek společnosti Good Medica Sp. z o.o. Ujistíme, že oscilační pila na sádku SAFE BLADE je zdravotnický výrobek nejvyšší kvality, který splňuje evropské normy, které potvrzuje označení CE.

Abyste mohli využívat plné možnosti tohoto zařízení a minimalizovali nebezpečí pro pacienta, seznamte se prosím s tímto návodem k obsluze. Nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu může způsobit poškození zařízení nebo ohrožení zdraví či života pacientů a obsluhujícího personálu.

O zařízení

Oscilační pila na sádku SAFE BLADE je přenosné mechanické zařízení pro řezání běžné a syntetické sádky. Díky použití oscilačního pohybu pilového listu se jedná o mimořádně bezpečné zařízení, a to jak pro obsluhu, tak i pacienta. Pilový list se pohybuje v rozsahu 4°, díky čemuž nedojde k poranění kůže ani při kontaktu s tělem. Pila je poháněna elektromotorem napájeným baterií. Kapacita baterie zajišťuje 5 hodin provozu. Pila velmi kompaktní, snadno se obsluhuje a čistí. Sada příslušenství obsahuje 3 pilové listy, náhradní baterii a zdroj.

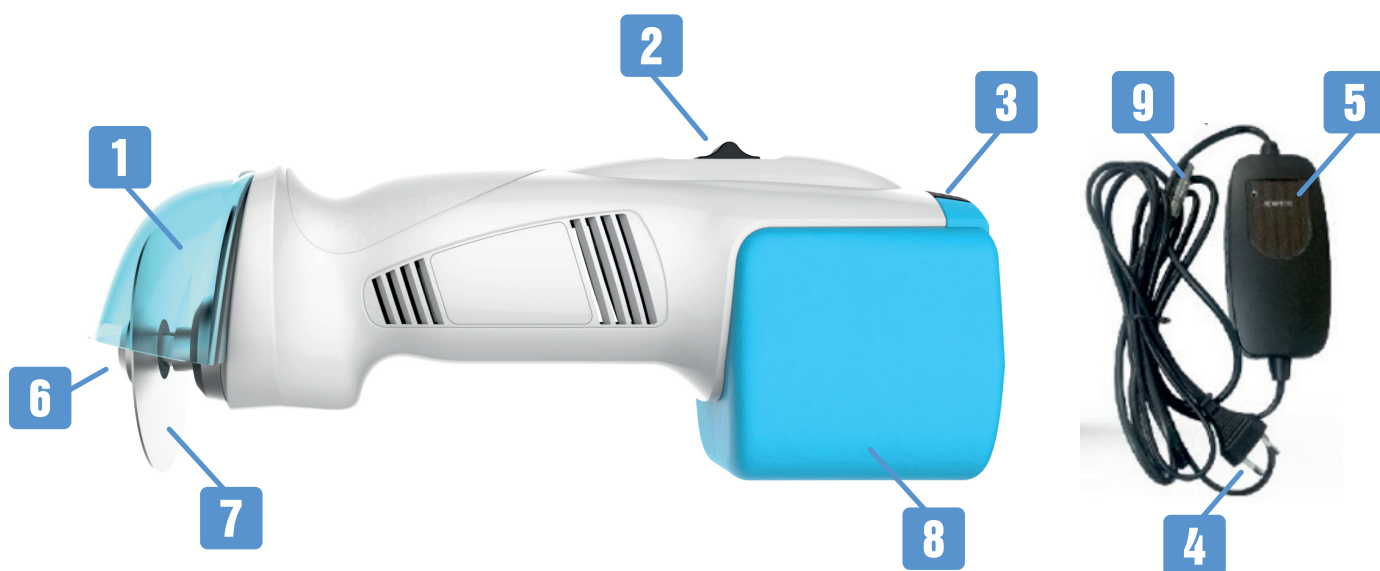

1. Kryt pilového listu
2. Vypínač
3. Aretace baterie
4. Napájecí zástrčka
5. Napáječ

6. Šroub utahující pilový list
7. Pilový list
8. Baterie
9. Síťová zástrčka

Parametry zařízení

Bezpečnostní třída	I
Podmínky použití	Podmínky použití: 5°C - 40°C Vlhkost vzduchu: 30% - 80% Atmosférický tlak: 700 hPa - 1060 hPa
Napájení	Zdroj k pile: 100 - 240 VAC 50/60 Hz Pila
Výkon	95 W
Kapacita baterie	3200 mAh
Maximální délka práce na baterii	5 h
Maximální rychlost pohybu pilového listu	12000 R.P.M.
Rozsah pohybu pilového listu	4°
Hluk při činnosti	<90 dB
Podmínky skladování	Teplota: -25°C - 70°C Vlhkost vzduchu: ≤ 80% Atmosférický tlak: 700 hPa - 1060 hPa
Rozměry zařízení	Výška: 23 cm Šířka: 6,5 cm Hloubka: 9 cm
Hmotnost zařízení	1,5 kg
Obsah sady	Hlavní zařízení s baterií 1 ks Sada pilových listů 3 ks Imbusový klíč 1 ks Baterie 2 ks Zdroj 1 ks Návod na obsluh 1 ks
Životnost zařízení	10 let



Pozor!

- Před zapnutím zařízení vždy zkontrolujte dotažení šroubu pilového listu (obr. 1, č. 6)
- Při používání držte oscilační pilu pevně v ruce
- Ventilační otvory musí být průchodné
- Pilový list musí být ostrý, nesmí být ohnutý nebo prasknutý
- Zařízení nenechávejte delší dobu běžet naprázdno (bez zatížení)

První zapnutí a nabíjení

Před prvním spuštěním nabijte baterii zařízení pomocí zdroje

1. Připojte zástrčku zdroje (obr. 1 č. 9) k AC síti (do zásuvky)
2. Připojte zástrčku zdroje (obr. 1 č. 4) k zásuvce pily
3. Zařízení nabíjejte 12 hod.

Zapnutí zařízení

1. Uchopte pilu pevně do ruky.
2. Palcem druhé volné ruky přepněte vypínač (obr. 1 č. 2) do polohy „I“

Vypnutí zařízení

1. Po přerezáni sádry ihned pilu vypněte přepnutím vypínače (obr. 1 č. 2) do polohy „O“

Kontrola dotažení a výměna pilového listu

Kontrola dotažení pilového listu

1. Imbusovým klíčem, který je součástí balení, zkontrolujte dotažení šroubu (obr. 1 č. 6) po směru pohybu hodinových ručiček. Šroub by měl být silně dotažený

Výměna pilového listu

1. Odstraňte kryt listu (obr. 1 č. 1) jeho vysunutím
2. Imbusovým klíčem, který je součástí balení, uvolněte šroub proti směru hodinových ručiček (obr. 1 č. 6)
3. Vytáhněte šroub ze zařízení
4. Odstraňte starý list
5. Nasad'te nový list
6. Imbusovým klíčem dotáhněte šroub po směru pohybu hodinových ručiček
7. Zasuňte kryt listu na místo (obr. 1 č. 1)

Bezpečnost při používání

Oscilační pila na sádro je připravená k okamžitému použití. Je zakázáno samostatně opravovat nebo zasahovat do konstrukce zařízení



POZOR!

Odstranění běžné nebo lehké sádry oscilační pilou by mělo probíhat na základě doporučení lékaře a až po konzultaci s lékařem. Zařízení musí obsluhovat proškolený personál

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ!

Znamená přímé nebezpečí.
Nedodržení může způsobit
smrt

POZOR!

Označuje nebezpečí.
Nedodržení může způsobit
nejtěžší úrazy včetně
smrtelných

POZOR!

Znamená to, že může dojít
k nebezpečné situaci, která
způsobí lehký úraz anebo
poškození zařízení



Nebezpečí

Nebezpečí výbuchu – zařízení nesmí být používáno ve zdravotnických prostorech s nebezpečím výbuchu. Nebezpečí výbuchu se může vyskytnout po kontaktu s hořlavými přípravky pro anestezii nebo např. přípravky pro dezinfekci kůže



Pozor

Ohrožení pro personál

Oscilační pilu nepoužívejte k žádnému jinému účelu než pro řezání sádry

Zařízení může obsluhovat pouze jedna osoba, která musí být seznámena s návodem na obsluhu

Kontrola technického stavu ventilů

Před každým použitím musí uživatel zkontrolovat stav zařízení z hlediska bezpečného používání
V případě zjištění poškození kontaktujte servis

Zabránění ohrožení pacienta

- Zárok pomocí oscilační pily nesmí způsobit podráždění.
- Během používání zařízení musí být pacient při plném vědomí. Pokud je sádru odstraňována u pacienta se sníženým vědomím nebo v bezvědomí je potřeba postupovat zvláště opatrně, protože pacient nebude schopen upozornit na své potíže.
- O použití zařízení rozhoduje lékař.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti bez větrání nebo vhodného osvětlení

Nebezpečí pro okolí

Nedovolte dětem a zvířatům, aby si hrály v blízkosti zařízení

Nebezpečí úrazu proudem

Pro zabránění úrazu proudem bezpodmínečně dodržujte následující upozornění. Jejich nedodržování může způsobit ohrožení života a zdraví pacienta anebo obsluhy, která používá oscilační pilu na sádru

Pokud bude nutné přepravovat zařízení při teplotě pod bodem mrazu, před opětovným zapnutím ho na cca 2 hod. v pokojové teplotě

Oscilační pila na sádru může být používána výhradně v suchých místnostech při pokojové teplotě

Oscilační pilu na sádru je možné zapojit výhradně do správně namontované síťové zásuvky

Před čištěním a dezinfekcí odpojte zařízení od napájecí sítě

Při odpojování netahejte za napájecí kabel

Dejte pozor, aby se zařízení ani zdroj nenamočily. Pokud dojde k namočení těchto prvků, kontaktujte servis (viz str. 11). Zařízení bude možné opět zapnout až po jeho zkontrolování v servisu

Pokud dojde k mechanickému poškození zařízení nebo nebude fungovat správně (např. příliš hlasitý chod, nadměrné vibrace), zařízení okamžitě vypněte a kontaktujte servis výrobce

Poruchy činnosti zařízení

Fungování může ovlivňovat magnetické a elektrické pole

Při používání oscilační pily na sádru dejte pozor, aby všechna jiná zařízení v blízkosti splňovala požadavky na elektromagnetickou toleranci

Zařízení, která jsou zdrojem elektromagnetického záření, tj. rtg přístroje, zařízení pro MRI, rádiové vysílače a mobilní telefony mohou pilu rušit. Od zařízení tohoto typu udržujte bezpečnou vzdálenost. Před použitím oscilační pily na sádru zkontrolujte její fungování

Nepoužívejte oscilační pilu na sádro v blízkosti zdroje ohně.

Zařízení musí být na každé straně ve vzdálenosti min. 30 cm od jiných předmětů.

Tato vzdálenost zaručuje správné větrání.

Alespoň jednou ročně je nutné zařízení zkontrolovat, zda není poškozené.

Opravy musí provádět servis výrobce.

Prevence alergií a úrazů

Alergie na umělou hmotu – k tomu může docházet u osob obsluhujících pilu.

Osoby alergické na umělou hmotu musí používat ochranné rukavice. Pokud známky alergické reakce neustupují, přestaňte pilu používat.

Je zakázáno zapínat pilu s vloženým imbusovým klíčem.

Během používání oscilační pily používejte ochranné brýle a protiprachový respirátor



Oscilační pilu SAFE BLADE nepoužívejte, pokud se nabíjí

Přeprava, uskladnění



POZOR!

Během přepravy musí být pila důkladně zajištěná a zabalená do krabice s ochrannou pěnou

Přeprava a podmínky skladování:

Teplota skladování: -25°C - 70°C

Vlhkost vzduchu: ≤ 80%

Atmosférický tlak: 700 hPa - 1060 hPa

Zařízení skladujte při vhodné vlhkosti, aby nedošlo ke korozi

Před použitím oscilační pily na sádro po dlouhodobém uskladnění nebo po dopravě vyzkoušejte všechny její funkce

Zařízení nevystavujte slunečnímu záření, příliš nízkým nebo vysokým teplotám

K čištění dlahy používejte bezalkoholové dezinfekční a čisticí ubrousky např. Sani-Cloth Active od Ecolab Sp. z o.o. Bezalkoholové ubrousky, které jsou připravené k okamžitému použití, mají baktericidní, fungicidní a tuberkulocidní účinky.

Nejprve odpojte zařízení od zdroje. Zařízení musí být vypnuté, vypínač musí být v poloze „O“. Pak odstraňte kryt a uvolněte pilový list. Po každém použití proveďte dezinfekci pilového listu a tělo zařízení důkladně otřete ubrousky. V případě nutnosti použijte více ubrousků.

V případě potřeby utřete zařízení dosucha měkkým bavlněným hadříkem.



POZOR!

Poškození zařízení

Aby nedošlo k poškození zařízení, nepoužívejte pro čištění jiné než výše uvedené dezinfekční prostředky, zejména nepoužívejte benzín nebo ředidla.

Nečistěte elektrické vypínače a kontakty příliš mokřými ubrousky.

Aby nedošlo ke změnám barvy zařízení, používejte výhradně bezbarvé dezinfekční prostředky.

Nejčastější poruchy

Pokud zařízení nejde zapnout:

1. Zařízení je patrně vybité
2. Zkontrolujte napájecí kabel a zdroj z hlediska mechanických poškození
3. Pokud není kabel poškozený, připojte zařízení do síťové zásuvky a nabíjejte ho 8 hod.
4. Pokud je kabel poškozený, kontaktujte servis

Na servis se obraťte v případě:

1. Namočení zařízení.
2. Mechanického poškození, tj. pádu z výšky atp.
3. Pochyby, zda zařízení funguje správně

Poškozené zařízení přestaňte používat a požádejte výrobce o opravu

Elektromagnetická kompatibilita

Zařízení je navrženo tak, aby bylo odolné proti vnějším elektromagnetickým vlivům. Dlaha při své činnosti generuje elektromagnetické vlnění, které může ovlivňovat fungování jiných zařízení

Péče o životní prostředí

Výrobek lze zcela zlikvidovat v souladu s platnými předpisy dané země (elektronické, kovové a umělohmotné součásti)



POZOR!

Zařízení nezapínejte v blízkosti jiných zařízení. Pokud musí být zařízení použito v blízkosti jiných zařízení, sledujte, zda funguje správně. Doporučovaná minimální vzdálenost od jiných zařízení je 30 cm

Štítek na zařízení



Vysvětlivky symbolů na štítku

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Dodržujte návod na obsluhu		Potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky Evropské unie na zdravotní a environmentální bezpečnost pro spotřebitele.
	Pozor, nebezpečí, upozornění		Výrobce
	Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace zařízení, příslušenství a obalu.		Recyklační piktogramy
	Minimální a maximální teplota činnosti zařízení		

Je zakázáno provádět úpravy zařízení.

Oscilační pila na sádro SAFE BLADE neobsahuje vnitřní díly, které by vyžadovaly servis uživatele. Vnitřní díly nedemontujte, neupravujte ani neopravujte. Nesprávně nebo špatně udržované zařízení může způsobit ohrožení pro uživatele a pacienta.

Každé zařízení SAFE BLADE musí jednou za rok absolvovat prohlídku v servisu Good Medica Sp. z o.o. V případě výskytu poruch se obraťte na servis

GOOD MEDICA SP. Z O.O.

Opolska 149
52-013 Wrocław, Polsko

☎ +48 71 715 64 97

✉ serwis@goodmedica.pl

DIČ: 701-037-24-51
REGON [IČ]: 146578763
KRS [Národní soudní rejstřík]: 0000453965

Vydání II
ze dne 19.02.2020

POZNÁMKY:



Good Medica Sp. z o.o.

Opolska 149
52-013 Wrocław, Polsko

☎ +48 71 715 64 97

✉ office@goodmedica.pl

🌐 www.goodmedica.pl